

Sistema de extirpación de tejido MyoSure®

Una solución integrada.

Para usted y sus pacientes.

MyoSure®
Tissue Removal Simplified

Una solución para la extirpación de tejido.

Ahora existe un método rápido y práctico de extirpar patologías intrauterinas, con dos potentes sistemas que funcionan como uno solo. El sistema de extirpación histeroscópica de tejido MyoSure y el sistema de gestión de fluido Aquilex le ofrecen una solución totalmente integrada, que simplifica la extirpación rápida de patologías intrauterinas al tiempo que preserva la forma y la función del útero.

MyoSure®
Tissue Removal Simplified

Histeroscopio con **óptica de lente** MyoSure u Omni que garantiza una visualización óptima.

Una consola MyoSure con **un solo interruptor de encendido/apagado** sin necesidad de hacer ajustes, de fácil aprendizaje y uso.

Mango ergonómico para mayor comodidad y facilidad de uso.



La **cuchilla patentada** gira y oscila simultáneamente a velocidades óptimas para un corte rápido del tejido.

Ventana de corte optimizada para un mejor contacto con el tejido y una resección tisular más eficaz.

histeroscópica

Aquilex®
Fluid Control System

Diseñado para optimizar los procesos MyoSure, la tecnología dual Aquilex permite mantener la distensión y la visualización independientemente del diámetro del histeroscopio, además de controlar el déficit de fluido.



Retención del tejido
de la patología en el
filtro colector.

Aquilex

- Bomba capaz de generar un flujo de 800ml/min.
- Dos fuentes de vacío incorporadas: una para la salida de fluido del histeroscopio capaz de producir una succión de hasta 125 mmHg; y otra para el dispositivo MyoSure capaz de producir una succión de hasta 500 mmHg.
- Calibración automática para optimizar la presión intrauterina.

Seguridad

- Visualización directa de la patología durante el procedimiento.
- Mecanismo de acción mecánico (sin energía eléctrica) para conservar la forma y la función uterinas.
- Corte y extirpación de tejido simultáneos.

Simplicidad

- Preparación y técnica quirúrgica sencillas.
- Realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos con un solo sistema.

Fiabilidad

- El uso de solución salina normal y un tiempo de intervención corto minimizan el riesgo de sobrecarga de fluido.
- La ventana de corte lateral proporciona más control para la extirpación de la patología detectada.
- Confirmación visual eficaz de la extirpación de la patología detectada.
- Integridad de la muestra: para mantener la histología con un modo de acción mecánico.

Comodidad

- Uso compatible con la mayoría de los sistemas de gestión de fluido u optimización del rendimiento con el sistema Aquilex.
- Mantenimiento de un flujo de trabajo eficiente y minimización de las interrupciones.
- Espacio incorporado en la plataforma Aquilex para la consola MyoSure.

Dispositivos de extirpación de tejido MyoSure

El sistema MyoSure ofrece una manera rápida y práctica de extirpar patologías intrauterinas mediante histeroscopia al tiempo que preserva la forma y la función uterinas, con una resección 100% mecánica que conserva los márgenes del tejido. El sistema MyoSure permite morcelar el tejido intrauterino, eliminando de la cavidad uterina mediante aspiración.

Dispositivos personalizados de extirpación de tejido



MyoSure MANUAL: visualización simplificada* para biopsias dirigidas y pólipos de ≤ 1 cm.



MyoSure LITE: la elección adecuada para pólipos pequeños.



MyoSure REACH: la opción versátil para una extirpación tisular ampliada y zonas de difícil acceso.



MyoSure XL: la opción potente para miomas grandes.

Recomendación del dispositivo según la patología

Los dispositivos de extirpación de tejido MyoSure proporcionan opciones de tratamiento personalizadas para la extirpación de pólipos y miomas.

Nuevo	MyoSure MANUAL	MyoSure LITE	MyoSure REACH**	MyoSure XL		
	0 cm	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm
Pólipos	→					
	→					
	→					
	→					
Miomas	→					
	→					

* No se requiere ni consola, ni sistema de gestión de fluido, ni fuente de vacío externa.

** Diseñado con una distancia reducida desde el extremo del dispositivo a la ventana de corte, de 3 mm a menos de 1 mm, para facilitar el acceso a la patología del fondo uterino.




ANTES



DURANTE



DESPUÉS

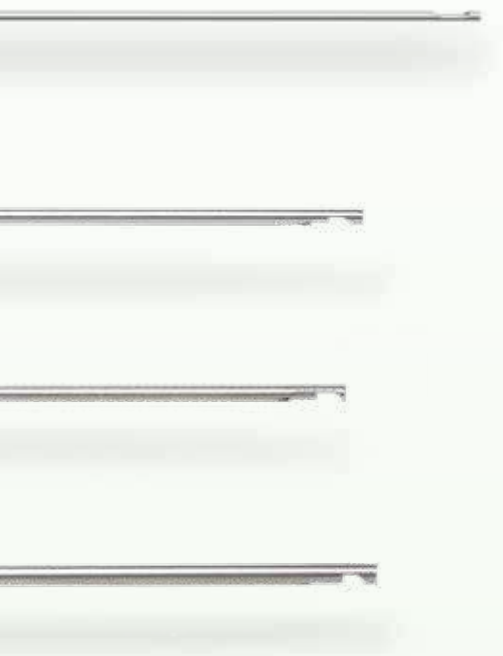

Visualización directa, rápida y cómoda para:

Pólipos

Facilita el diagnóstico y la extirpación de pólipos y confirma histológicamente la ausencia o presencia de cáncer.

Miomas

Extirpa tejido miometrial y conserva la forma y la función uterinas.

Productos retenidos de la concepción

Extirpa solo el tejido retenido deseado y reduce el riesgo de daño en el tejido sano bajo visualización directa.

Biopsias dirigidas

Identifica y extirpa el tejido sospechoso para su análisis histológico.

Adherencias histeroscópicas

Extirpa adherencias intrauterinas con el mínimo daño en el tejido endometrial.

Septos

Permite un abordaje histeroscópico sencillo para la resección de septos uterinos.

Especificaciones técnicas del MyoSure

Dispositivos de extirpación de tejido

		MyoSure MANUAL**	MyoSure LITE**	MyoSure REACH**	MyoSure XL**
Tejido recomendado	Biopsia dirigida	✓	✓		
	Pólipos	Pólipos ≤ 1 cm	Pólipos ≤ 3 cm	Todos	Todos
	Miomas			Miomas ≤ 3 cm	Miomas ≤ 5 cm
Diámetro exterior del dispositivo		3 mm	3 mm	3 mm	4 mm
Longitud de trabajo		32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
Ventana de corte	Longitud	10,2 mm	10,2 mm	14,0 mm	14,0 mm
	Profundidad	1,5 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,4 mm
	Tamaño	31 mm ³	31 mm ³	54 mm ³	98 mm ³
Compatibilidad del histeroscopio	MyoSure	✓	✓	✓	
	MyoSure XL	✓	✓	✓	✓
	Omni 5,5 mm	✓	✓	✓	
	Omni 6 mm	✓	✓	✓	✓
Especificaciones de rendimiento*		N/A	Pólipo de 3 cm ≤ 2 minutos	Mioma de 3 cm ≤ 10 minutos	Mioma de 5 cm ≤ 15 minutos
Velocidad de extirpación de tejido*		N/A	7,0 g/min (tejido poliposo)	1,5 g/min (tejido miomatoso)	4,3 g/min (tejido miomatoso)
Velocidad de la cuchilla		N/A	8075 revoluciones/min y 3 ciclos/segundo	8075 revoluciones/min y 3 ciclos/segundo	8075 revoluciones/min y 3 ciclos/segundo


* Basado en pruebas con tejidos análogos

** El material de todas las cuchillas es acero inoxidable con alta resistencia al desgaste

MyoSure



MyoSure REACH

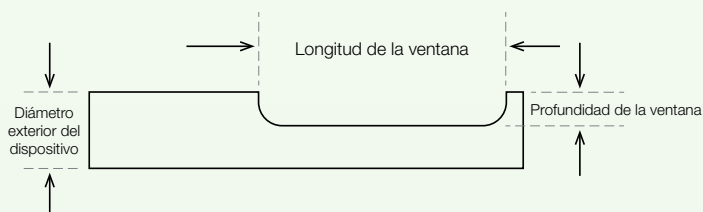

Información para pedidos

SISTEMA DE EXTIRPACIÓN HISTEROSCÓPICA DE TEJIDO MYOSURE®

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO
Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure MANUAL: 3 dispositivos por caja	20-403ML
Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure LITE: 3 dispositivos por caja	30-403LITE
Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure REACH: 3 dispositivos por caja	10-403FC
Dispositivo de extirpación de tejido MyoSure XL: 3 dispositivos por caja	50-503XL
Consola MyoSure (incluye pedal)	10-550
Histeroscopio MyoSure Classic (Ø 6,25 mm) con canal de lavado	40-250
Histeroscopio MyoSure XL (Ø 7,25 mm) con canal de lavado	50-250XL
Histeroscopio Omni™ Standard Pack (3 vainas: Ø 3,7 mm - Ø 5,5 mm - Ø 6 mm)	60-250-1
Histeroscopio Omni™ Light Pack (2 vainas: Ø 3,7 mm y Ø 5,5 mm)	60-250-2
Tapones de sellado (10 / caja)	40-902
Bandeja de esterilización y almacenaje del histeroscopio MyoSure	MME-02584
Bandeja de esterilización y almacenaje del histeroscopio Omni™	60-903

SISTEMA DE CONTROL DE FLUIDO AQUILEX™

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PEDIDO
Sistema de control de fluido Aquilex	AQL-100
Juego de tubos de entrada y salida (10 de cada por caja)	AQL-112
Juego de tubos de vacío reutilizables (alto y bajo) (10 por caja)	AQL-114

Para realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Hologic llamando al teléfono siguiente: **900 994 197**

Sencillo. Eficiente. Preciso.

El dispositivo MyoSure proporciona una solución precisa y sencilla para extirpar patologías, incluidos pólipos, miomas y productos retenidos de la concepción. Puede realizar todas las etapas de la evaluación y de la extirpación de tejido utilizando un solo histeroscopio; es la manera más fácil y rápida de visualizar y así guiar el procedimiento, que se optimiza con el sistema Aquilex.

Este sistema está diseñado para minimizar la duración del procedimiento, alcanzando rápidamente una distensión constante y manteniéndola con independencia del diámetro del histeroscopio, lo que reduce la duración de la anestesia y el riesgo de intravasación y, a la vez, ofrece una visualización óptima.

Con estos productos, Hologic contribuye a satisfacer sus necesidades en ginecología, ayudándole a cambiar y a mejorar de forma significativa las vidas de sus pacientes.

