



COMBINA LA RECONOCIDA TECNOLOGÍA DE IMAGEN THINPREP® Y LA REVISIÓN DE PORTAOBJETOS EN UN SOLO DISPOSITIVO

Utilice la tecnología de imagen ThinPrep para estandarizar la revisión de citología

Formación de imagen

- Para cada portaobjetos se obtiene una imagen en 90 segundos, aproximadamente
- Se escanean todas las células y grupos celulares del portaobjetos
- Se identifican y se almacenan las coordenadas de los 22 objetos más grandes y oscuros


Mayor comodidad

- El instrumento de revisión puede utilizarse como microscopio convencional, lo que ahorra un valioso espacio de trabajo
- Pantalla táctil fácil de usar y soporte y controles de revisión ergonómicos
- La alineación automática de las marcas de referencia ahorra tiempo y aumenta la precisión
- Las comprobaciones funcionales automáticas posteriores al escaneo garantizan la integridad de los datos


Revisión

- Se comporta como un microscopio automático, ya que presenta los 22 campos de visión (CDV)
- El proceso de revisión dual combina la experiencia humana con la potencia de la Digitalización de imágenes por ordenador para ofrecer la mejor solución para su laboratorio
- Si se identifican células anómalas, debe revisarse todo el portaobjetos
- Si los 22 CDV son normales, el portaobjetos puede registrarse finalmente como negativo
- Al concentrarse en los casos anómalos, el citotecnólogo (CT) puede ser más eficaz en la detección

VISTA
LATERAL

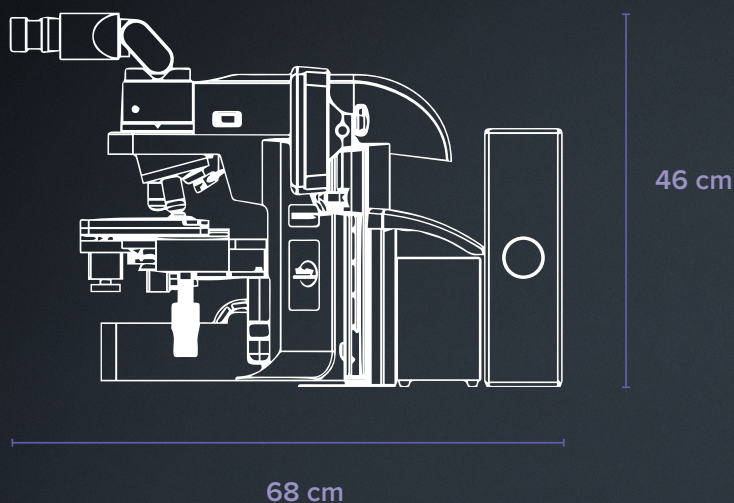

VISTA
SUPERIOR

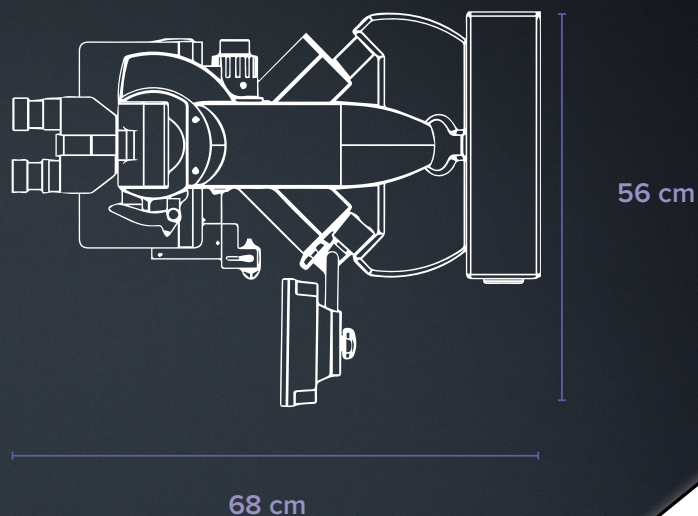

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA IMAGER INTEGRADO THINPREP®



Dimensiones	Anchura: 56 cm Altura: 46 cm Profundidad: 68 cm
Peso	31 kg
Temperatura de funcionamiento	16-32 °C
Humedad en funcionamiento	HR del 20% al 80%, sin condensación
Tensión eléctrica	100-120 V / 220-240 V, monofásica
Frecuencia	50-60 Hz +/- 10%

Diagnostic Solutions | Hologic.com | euinfo@hologic.com

PB-00484-IBR-ES Rev. 001 © 2016 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Hologic, Science of Sure, ThinPrep, UroCyté y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Esta información va dirigida a los profesionales médicos y no está pensada como ofrecimiento o promoción del producto en los lugares en que dichas actividades estén prohibidas. Debido a que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, podcasts y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos disponibles para la venta en un país determinado, póngase en contacto con su representante de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com.

