

Sistema de guía inalámbrico **LOCalizer™**

Con el sistema inalámbrico de localización de lesiones de mama de Hologic, usted tendrá plena certeza.

LOCalizer™ es un sistema inalámbrico de identificación por radiofrecuencia (RFID) de localización de lesiones de mama que proporciona una guía precisa y fácil de usar para cirugía de la mama.



Características del sistema LOCalizer™:

Comodidad sin cables

El sistema LOCalizer™ marca la lesión con una radiofrecuencia en miniatura. La etiqueta puede implantarse en la mama en cualquier momento antes del día de la cirugía. La ausencia de cables quirúrgicos reduce el estrés del paciente y evita conflictos para programar la localización.

Simplicidad sin radioactividad

El sistema LOCalizer™ evita regulaciones complejas relacionadas con el manejo de materiales radioactivos.

Etiqueta RFID en miniatura avanzada

Cada etiqueta tiene un número de identificación exclusivo y tiene un recubrimiento antimigratorio patentado, lo que permite la identificación inequívoca de la etiqueta y que se mantenga en la posición deseada. La etiqueta es claramente visible en ecografía, radiografía y RM, lo que permite una colocación flexible con múltiples modalidades de obtención de imágenes.

Lector móvil portátil transportable

El lector móvil portátil, adecuado para su uso tanto en entornos estériles* como no estériles, se puede colocar en un lugar conveniente próximo al paciente. Su exclusivo diseño portátil ocupa muy poco espacio en el quirófano.

Sin interferencias con el equipo del quirófano

El sistema LOCalizer™ cumple con todas las normas de compatibilidad electromagnética y de seguridad eléctrica inalámbrica y está diseñado para funcionar sin interferencias en el quirófano.

Medidor de distancia fácil de leer

El lector portátil muestra la distancia a la etiqueta en milímetros y el número de ID de la etiqueta en una pantalla brillante, por lo que se puede leer fácilmente durante el procedimiento. El sistema LOCalizer™ puede leer la etiqueta desde al menos 60 mm de distancia.

Exactitud de la sonda integrada

La sonda de lazo integrada es parte del propio lector y se puede usar sobre la superficie de la piel tanto en entornos estériles* como no estériles para confirmar la posición de la etiqueta y planificar la trayectoria quirúrgica.

Sonda estéril de un solo uso

La sonda quirúrgica es una sonda estéril de un solo uso, del tamaño de un lápiz, que guiará al cirujano hacia la etiqueta durante la operación. El diámetro de 8 mm de la sonda permite incisiones más pequeñas.

Medición de la distancia en tiempo real

El sistema LOCalizer™ se diseñó para notificar la distancia a la etiqueta sin desfases ni demoras.

Ayuda con tono audible

El sistema va acompañado de un tono que proporciona una guía no visual al cirujano durante el procedimiento, asegurando la información sobre la proximidad a la lesión de forma constante.

Una completa **gama de soluciones**

El sistema de guía quirúrgica LOCalizer™ se adapta perfectamente a la gama completa de soluciones de conservación de la mama de Hologic. Hologic cuenta con un conjunto completo de productos para cirugía conservadora de mama para mejorar la eficiencia, optimizar la experiencia de la paciente y lograr el mejor desenlace posible. Consulte con su representante sobre los sistemas que se pueden ajustar mejor a sus necesidades y a las de sus pacientes, garantizando que tendrán la mejor atención posible cuando más lo necesitan.

Marcador bioabsorbible 3D BioZorb[®]
Sin marca CE.
No disponible para la venta.



Sonda gamma de un solo uso
TruNode[®]



Le invitamos a consultar con su representante de Hologic para saber qué soluciones conservadoras de mama son adecuadas para usted y sus pacientes.

www.hologic.es | info@hologic.com | +32.2.711.4680