

Mamografías más cómodas. Más pacientes satisfechas.

Hologic responde a una de las principales razones que pueden llevar a las mujeres a evitar una mamografía que podría salvarles la vida: las molestias que genera la prueba.¹ Así, nuestro sistema de estabilización mamaria SmartCurve™ ofrece una experiencia excepcional a las pacientes sin comprometer la calidad de la imagen, el flujo de trabajo ni la dosis. El sistema incluye tres palas para adaptarse a la mayoría de las mujeres y tamaños de mama.



El sistema SmartCurve™, según demuestran los estudios clínicos, permite una mamografía más cómoda sin incrementar la dosis.²



La superficie de compresión curvada imita la forma de la mama de la mujer.



El 95 % de las mujeres encuestadas recomiendan los centros que usan el sistema SmartCurve™.²



El sistema SmartCurve™ cambiará la forma en que las mujeres perciben el cribado mamario.

El miedo al dolor hace que muchas mujeres no consideren el cribado periódico de mama como una prioridad para su salud, lo que retrasa diagnósticos de cáncer que podrían salvar vidas. El sistema SmartCurve™ se ha diseñado para solucionar este problema y transformar la experiencia del cribado, tanto para usted como para sus pacientes. Ahora, con la nueva pala SmartCurve™ Mini, será más fácil adaptarse a mamas de pequeño tamaño, incluso en pacientes masculinos, y a mamas que presenten implantes desplazados.



El paquete triple contiene una pala grande (24 x 29 cm), una pequeña (18 x 24 cm) y una mini (18 x 8 cm).**

- Las superficie de compresión se adapta a la forma de la mama y es curvada en la pared torácica y en los laterales para reducir el pellizco.
- Se ha demostrado que **mejora la comodidad en el 93 % de las pacientes** que comunicaron molestias moderadas o intensas con las palas de compresión estándar.²
- **El software de procesamiento** tiene en cuenta la geometría de la pala, por lo que la calidad de la imagen no se ve afectada.²
- No es necesario **modificar la técnica de colocación ni el flujo de trabajo** de los técnicos.
- Puede utilizarse con una **almohadilla mamaria MammoPad®** para aumentar tanto la amortiguación como la captura de tejido.³

Pruebas. No promesas.

Información del producto

El sistema SmartCurve™ está destinado al cribado y a la mamografía diagnóstica y no debe utilizarse para procedimientos de biopsia o procedimientos con contraste I-View™). No está recomendado para obtener una vista posteromedial, con rotación o en mosaico de mamas muy grandes. Las palas estándar de cribado se incluyen siempre con el sistema y deben utilizarse en los casos en que el sistema SmartCurve™ no sea apropiado. SmartCurve™ puede utilizarse en pacientes con implantes mamarios.

El sistema SmartCurve™ está incluido en todos los nuevos sistemas 3Dimensions™ y está disponible como una actualización para los actuales sistemas Selenia® Dimensions®.

** Requiere como mínimo el software Dimensions 1.1/2.2 o posterior.

Información para pedidos

Número de componente	Descripción
DIM-ASY-SCS-3PACK	Actualización al paquete triple del sistema de estabilización mamaria SmartCurve™ para los sistemas Selenia® Dimensions®.
DIM-ASY-MINI	Solo incluye la pala SmartCurve™ Mini para mamas pequeñas.

Bibliografía

1. Padoan M, Ferrante D, Pretti G, Magnani C. Study of socio-economic characteristics, diagnosis and outcome of women participating or not participating in mammogram screening. *Ann Ig*. 2014; 26(6):518-526.
2. Datos en archivo: DHM-06039 Rev 002 Bartoshevich J, Orefice T, Mansoor S, et al Internal Study comparing Hologic's flat paddle to the SmartCurve paddle (18x24cm) (2017).
3. Coryell T. Increasing mammography tissue acquisition through positioning training and use of a foam breast cushion. National Consortium of Breast Centers, 16th Annual National Interdisciplinary Breast Conference, Las Vegas, NV, Estados Unidos (2006).

SS-00523-EUR-ES Rev. 002 (04/21) Hologic Inc. © 2021 Reservados todos los derechos. Hologic, Dimensions, MammoPad, Selenia, SmartCurve, The Science of Sure y sus logotipos asociados son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a los profesionales médicos y no está pensada como ofrecimiento o promoción del producto en los lugares en que dichas actividades estén prohibidas. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares en los que aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic.

www.3dimensionmammography.eu | euinfo@hologic.com | +32.2.711.4680

Sin compromiso. Sin parangón.