

Malla de RF
bipolar

Tecnología de sellado
Endoform™

Diámetro de 6 mm con
marcas
AccuSheath™

Tecnología
Sureclear™


Características y ventajas clave

Presentamos la próxima generación de NovaSure®

NovaSure V5

Ablación endometrial

Haciendo historia

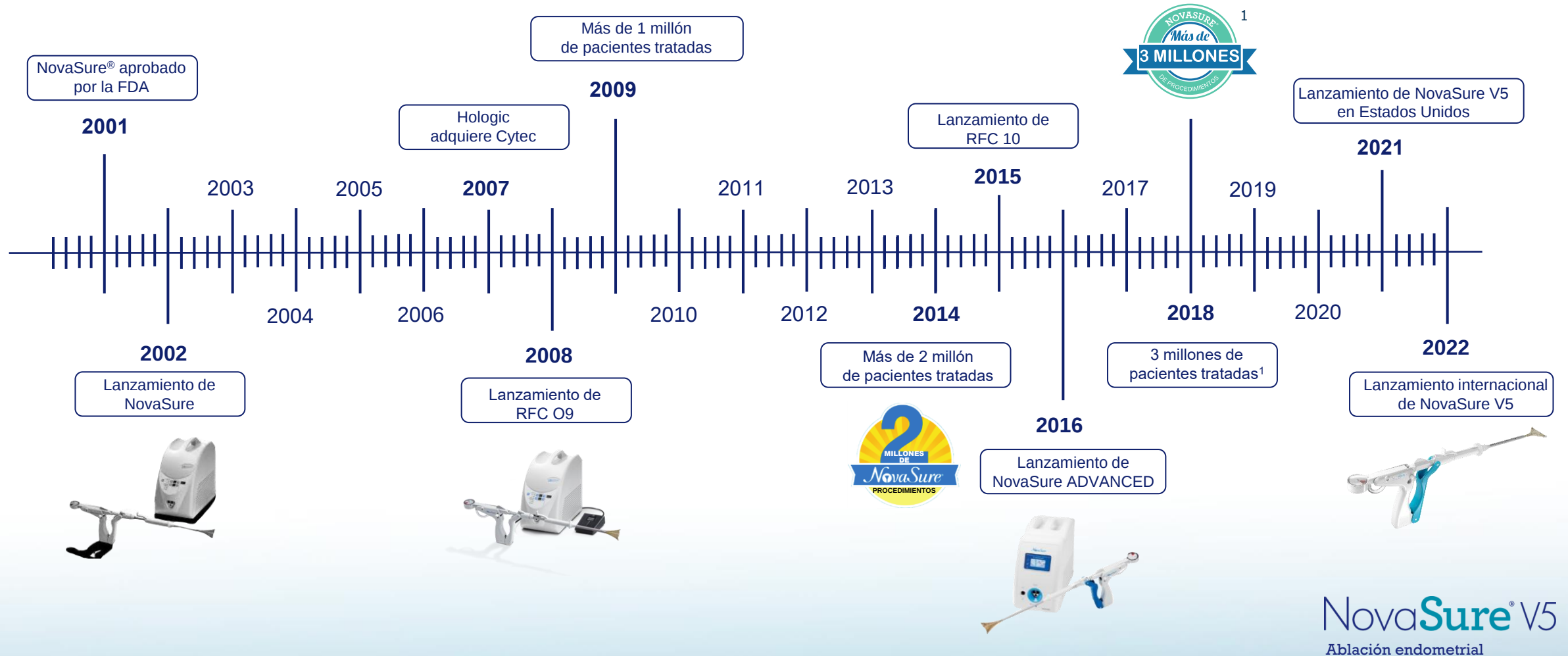

20 años de innovación plasmados en un dispositivo completamente nuevo

HOLOGIC®

DE CONFIANZA



1 Satisfacción de la paciente del 97 %²

Índice de amenorrea del 75 % a los 5 años³

Se evita la histerectomía en el 86 % de las pacientes a los 10 años⁴



INNOVADOR

Más de 3 millones de procedimientos realizados en todo el mundo que han impulsado mejoras de diseño continuas a lo largo de los años basadas en los comentarios de los usuarios.



DISEÑO ORIENTADO A LAS NECESIDADES DE LA PACIENTE

Indicado para una amplia variedad de anatomías uterinas y cervicouterinas únicas gracias a características mejoradas.

¹ Conforme a datos comerciales de Hologic Inc. (unidades enviadas entre 2004 y 2018)

² Baskett TF, Clough H, Scott TA. NovaSure bipolar radiofrequency endometrial ablation: report of 200 cases. Journal of Obstetricians and Gynecologists Canada. 2005;27(5):473–476.

³ Gallinat A. An impedance-controlled system for endometrial ablation: Five-year follow up on 107 patients. J Reprod Med. 2007; 52:467-472 1

⁴ Herman M, Penninx J, Mol B, Bongers M. Ten-year follow-up of a randomised controlled trial comparing bipolar endometrial ablation with balloon ablation for heavy menstrual bleeding. BJOG 2013;120:966–970

NovaSure® V5
Ablación endometrial

NovaSure® V5

Ablación endometrial

con...

TECNOLOGÍA SMARTDEPTH™



EJEMPLO EN ÚTEROS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA
DEMOSTRAR LA PROFUNDIDAD DE ABLACIÓN UNIFORME

La tecnología NovaSure SMARTDEPTH monitoriza y mide de forma continua la impedancia del tejido a fin de garantizar una profundidad de ablación personalizada, fiable y reproducible en cada paciente.

NovaSure® V5
Ablación endometrial

Ablación endometrial NovaSure® con tecnología SmartDepth™:

HOLOGIC®



SMART:

La tecnología SMART:

- Monitoriza y mide de forma continua la impedancia del tejido
- Calcula automáticamente el nivel de potencia óptimo necesario para el tratamiento en función del tamaño de la cavidad uterina.



UNIQUE

El sistema de eliminación de líquidos con tecnología UNIQUE SureClear™:

- Permite un contacto constante del tejido con la malla mediante un sistema de aspiración integrado
- Al mismo tiempo, elimina el vapor, la sangre y otros subproductos.




SAFE

Sistema SAFE de evaluación de la integridad de la cavidad uterina (ICU):

- Prueba de seguridad incorporada que confirma la integridad de la cavidad uterina.
- Proporciona confianza necesaria para realizar una ablación segura y eficaz en cada paciente.

NovaSure® V5
Ablación endometrial

Descripción general del equipo

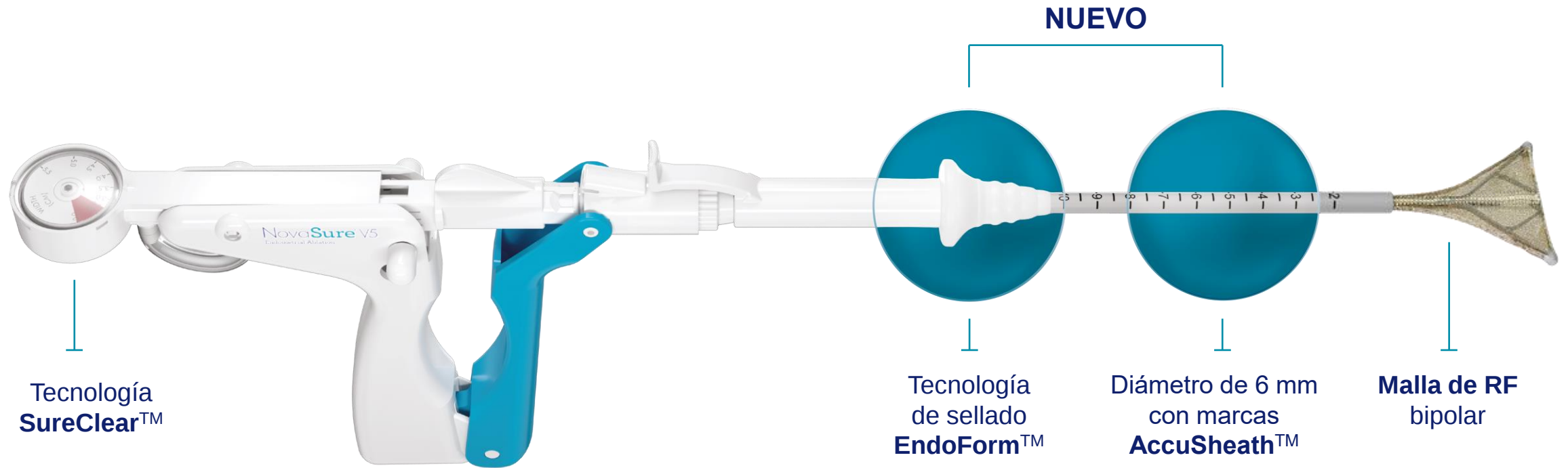



Características y ventajas clave

Ablación personalizada



CARACTERÍSTICAS

La tecnología NovaSure® ofrece un procedimiento de **ablación personalizada** con:

01

ENERGÍA DE RF
BIPOLAR

02

EVALUACIÓN
PROACTIVA DE
LA CAVIDAD

03

SISTEMA DE ELIMINACIÓN
DE LÍQUIDOS CON
TECNOLOGÍA
SURECLEAR™

04

CRITERIO DE
VALORACIÓN
FISIOLÓGICO


NovaSure® V5

Ablación endometrial

Cómo funciona

Energía de RF bipolar

Energía de radiofrecuencia bipolar rápida y controlada que se personaliza de acuerdo con las mediciones de la cavidad uterina de la paciente.

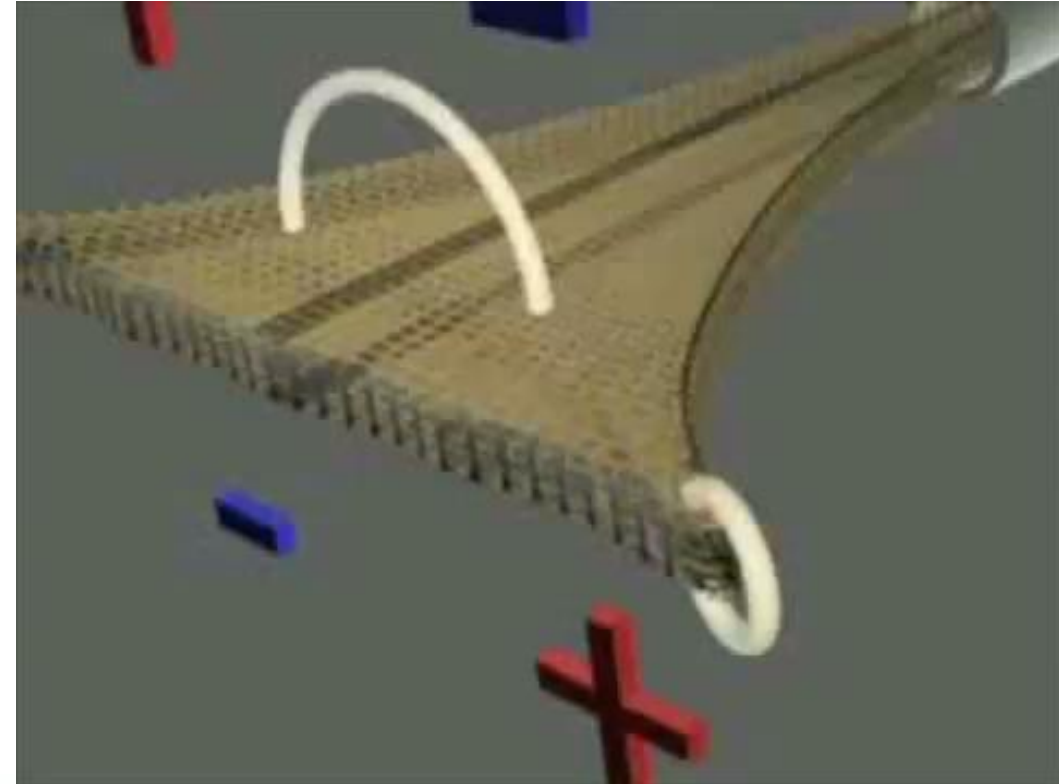

NovaSure® V5
Ablación endometrial

Cómo funciona

Evaluación proactiva de la cavidad

La evaluación para confirmar de la integridad de la cavidad uterina es un procedimiento de seguridad proactivo delicado.

El sistema NovaSure® permite detectar fugas de presión de tamaño muy reducido (hasta un calibre de aguja de 18) a fin de confirmar la integridad de la cavidad uterina.




NovaSure® V5
Ablación endometrial

Cómo funciona

Sistema de eliminación de líquidos con tecnología SureClear™

Garantiza el contacto del tejido con la malla y elimina el vapor, la sangre y otros subproductos.

La ablación personalizada es posible en parte gracias a esta característica de aspiración continua.

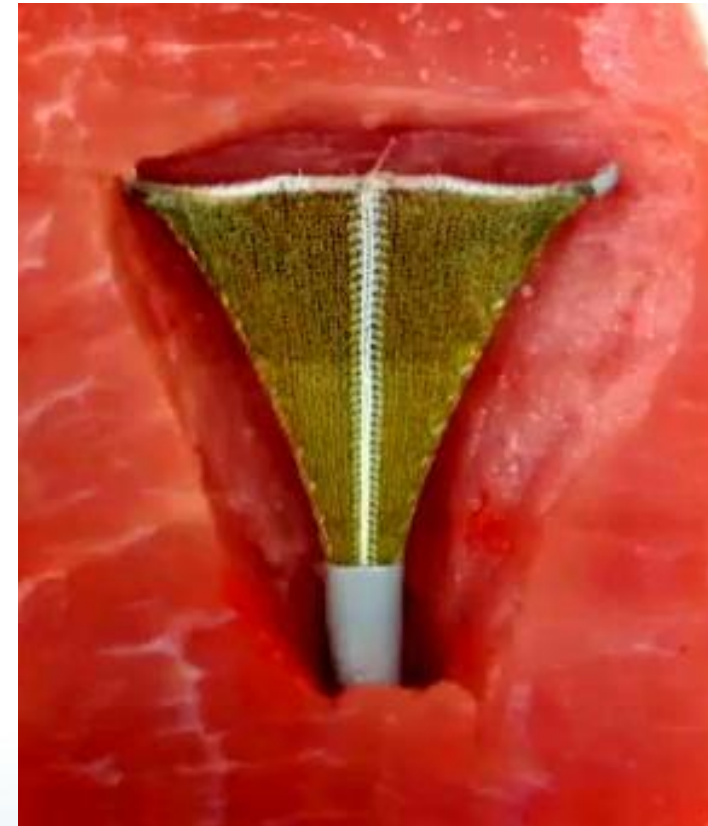


NovaSure® V5
Ablación endometrial

Cómo funciona

Sistema de eliminación de líquidos con tecnología SureClear™

Garantiza el contacto del tejido con la malla y elimina el vapor, la sangre y otros subproductos.

La ablación personalizada es posible en parte gracias a esta característica de aspiración continua.

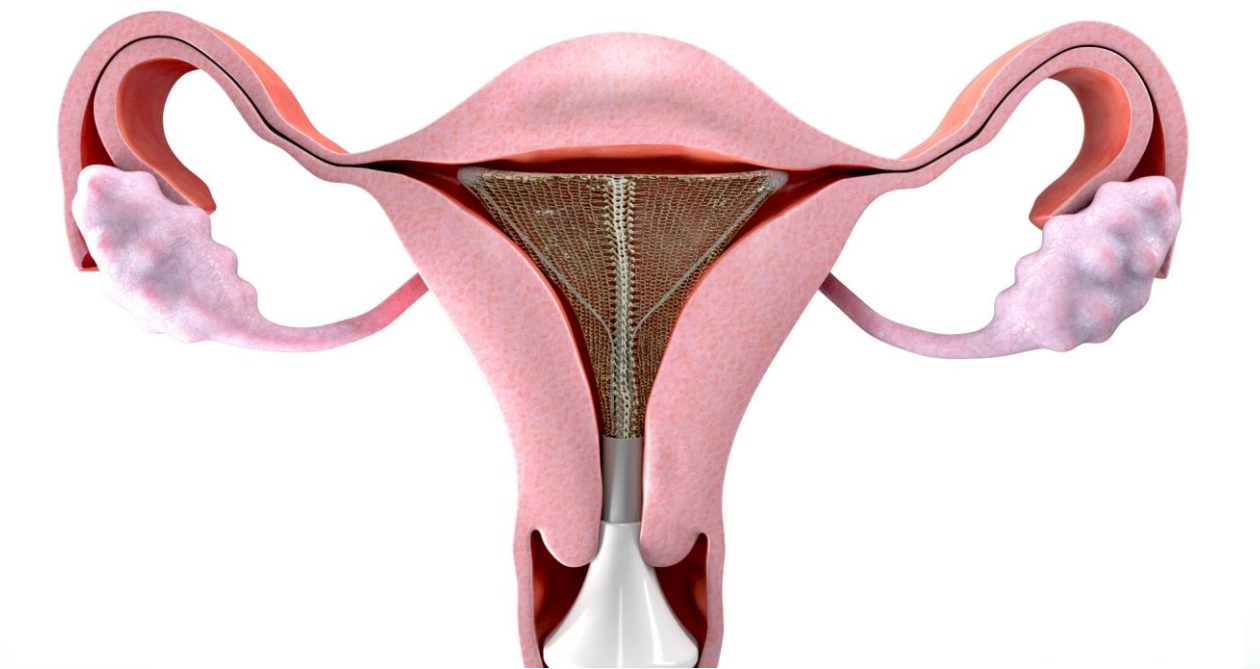


NovaSure® V5
Ablación endometrial

Cómo funciona

Criterios de valoración fisiológica

La ablación personalizada se consigue al alcanzar el criterio de valoración científico de 50 ohmios de impedancia.

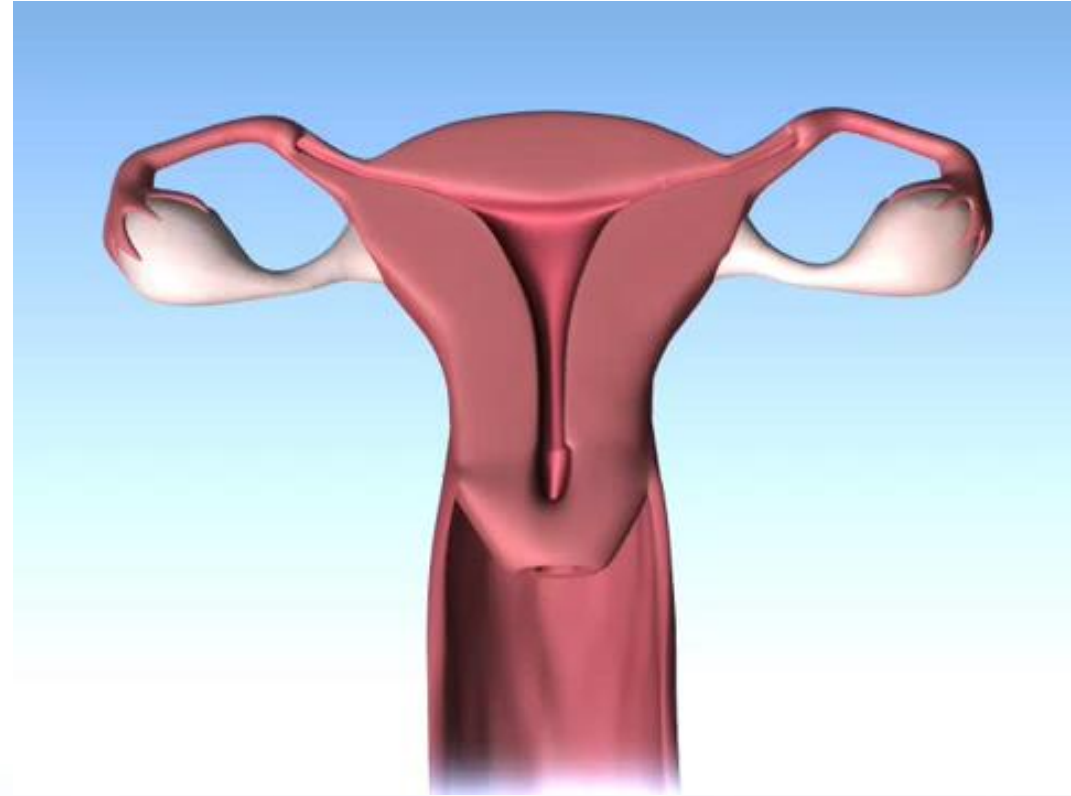

NovaSure® V5
Ablación endometrial

Pasos del procedimiento




Técnica de asentamiento de NovaSure®: descripción*

HOLOGIC®

A fin de mantener resultados clínicos óptimos y reducir las complicaciones, se debe emplear la técnica siguiente.

*Consulte las instrucciones de uso completas de la consola y del dispositivo NovaSure, así como las advertencias, las contraindicaciones y la información de seguridad

1 Hacer avanzar

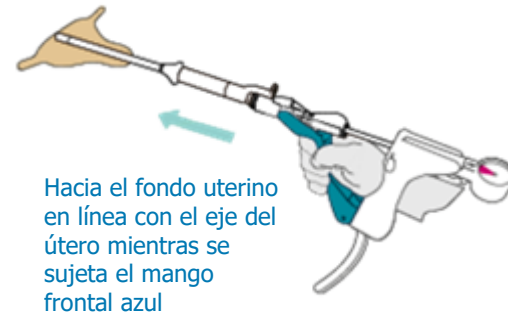


2 Retirar



3 Colocar



4 Girar y pulsar

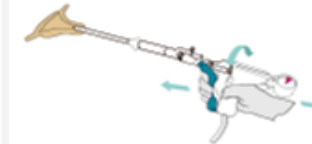


NovaSure® V5
Ablación endometrial

Técnica de asentamiento de NovaSure®: descripción* (continuación)

HOLOGIC®

*Consulte las instrucciones de uso completas de la consola y del dispositivo NovaSure, así como las advertencias, las contraindicaciones y la información de seguridad

5 Bloquear

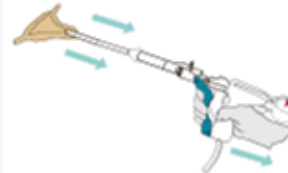

Apriete para bloquear

6 Mover transversalmente




Desplace el dispositivo suavemente con movimiento anterior, posterior y lateral

7 Tirar hacia atrás



Tire hacia atrás levemente hasta que la lectura del disco de anchura se reduzca en 0,2-0,5 cm

8 Hacer avanzar

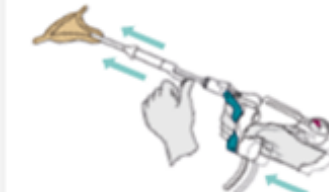

Sujete el tenáculo, haga avanzar el dispositivo hacia el fondo uterino y deslice el collar cervicouterino

NovaSure® V5

Ablación endometrial

20 años de innovación plasmados en un dispositivo completamente nuevo

HOLOGIC®

DE CONFIANZA



1 Satisfacción de la paciente del 97 %²

Índice de amenorrea del 75 % a los 5 años³

Se evita la histerectomía en el 86 % de las pacientes a los 10 años⁴



INNOVADOR



Más de 3 millones de procedimientos realizados en todo el mundo que han impulsado mejoras de diseño continuas a lo largo de los años basadas en los comentarios de los usuarios.

DISEÑO ORIENTADO A LAS NECESIDADES DE LA PACIENTE



Indicado para una amplia variedad de anatomías uterinas y cervicouterinas únicas gracias a características mejoradas.

1 Conforme a datos comerciales de Hologic Inc. (unidades enviadas entre 2004 y 2018)

2 Baskett TF, Clough H, Scott TA. NovaSure bipolar radiofrequency endometrial ablation: report of 200 cases. Journal of Obstetricians and Gynecologists Canada. 2005;27(5):473-476.

3 Gallinat A. An impedance-controlled system for endometrial ablation: Five-year follow up on 107 patients. J Reprod Med. 2007; 52:467-472 1

4 Herman M, Penninx J, Mol B, Bongers M. Ten-year follow-up of a randomised controlled trial comparing bipolar endometrial ablation with balloon ablation for heavy menstrual bleeding. BJOG 2013;120:966-970

NovaSure® V5

Ablación endometrial

Información de seguridad

Información importante sobre seguridad

El sistema de ablación endometrial NovaSure® está indicado para mujeres premenopáusicas con hemorragia menstrual abundante por causas benignas que han completado su etapa reproductiva. Después del procedimiento NovaSure, el embarazo puede ser peligroso. El procedimiento NovaSure no está indicado en mujeres con diagnóstico confirmado o sospecha de cáncer uterino, con una infección genital, urinaria o pélvica activa o portadoras de un DIU. La ablación endometrial mediante NovaSure no es un procedimiento de esterilización. Sus riesgos, infrecuentes pero graves, son, entre otros, lesión térmica, perforación e infección. Los efectos secundarios temporales pueden incluir calambres, náuseas, vómitos, leucorrea y oligometrorragia. Indique a las pacientes que se pongan en contacto con usted si experimentan un posible efecto secundario relacionado con el uso de este producto. Para obtener información detallada sobre los riesgos y beneficios, consulte las instrucciones de uso.

Visite **Hologic.es/NovaSure** o póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre nuestros productos.

CE 2797 **EC REP** Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Bélgica

Bibliografía: 1. Hologic Inc., Datos en archivo, 2018. Basado en el número de unidades vendidas de 2004 a 2018.

PRE-01633-IBR-ES Rev 001 © 2023 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic. Hologic, AccuSheath, EndoForm, NovaSure, SmartDepth, SureClear y sus logotipos asociados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hologic, Inc., y/o de sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países. Esta información va dirigida a profesionales médicos y no se ha desarrollado como oferta o promoción del producto en los lugares donde estén prohibidas dichas actividades. Dado que los materiales de Hologic se distribuyen a través de sitios web, publicaciones electrónicas y ferias del sector, no siempre es posible controlar los lugares donde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre los productos que se comercializan en un determinado país, póngase en contacto con su representante local de Hologic. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Hologic o escriba a euinfo@hologic.com

NovaSure® V5
Ablación endometrial